

INSTRUKCIJA SARS COV – 2 NAZOFARENGIĀLĀ PARAUGA SAVĀKŠANAI IZMANTOJOT FLOCKED MINI-TIP ZONDI UN UTM™ UNIVERSĀLO TRANSPORTA BAROTNI


SAVĀKŠANAS PIEDERUMI

- Zonde lokaina ar tamponu
- Barotnes stobrs (UTM)

ievietojiet
nāsī




Laušanas
vieta

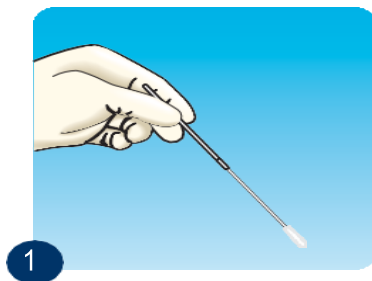


1

Izņemiet zondi no iepakojuma, turot tās galu un atrodiēt laušanas vietu

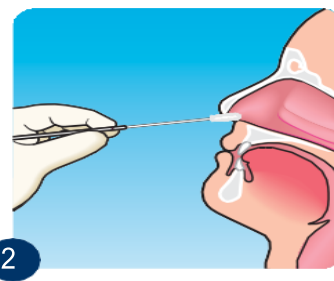


2

Atgāziet galvu nedaudz uz aizmuguri

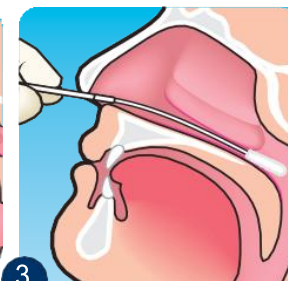

3


Uzmanīgi ievietojiet zondi nāsī. Turiet zondi blakus deguna starpsienai, uzmanīgi iestumjiet zondes galu aizdegunē

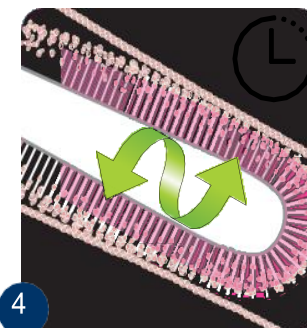

4

Kad zonde ir pareizajā vietā aizdegunē, uzmanīgi rotējiet to ar apļveida kustībām uzspiežot uz gļotādu 10-15 sekundes un tad izņemiet zondi

Iepakojiēt paraugu

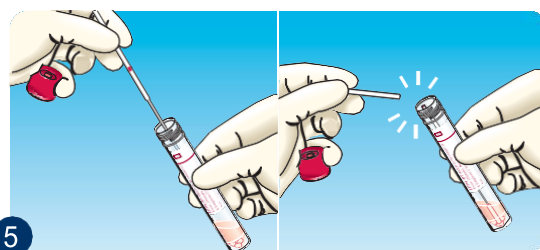

5

- Turot zondi, noņemiet stobriņa korķīti.
- Ievietojiet zondi stobriņā līdz laušanas punkts ir vienā līmenī ar stobriņa atveri.
- Lociet zondi 180 grādu leņķī, lai to nolauztu laušanas vietā.



6

Izmetiet nolauzto zondes daļu tam paredzētajā atkritumu konteinerī.



7

Uzskrūvējiet stobriņam korķīti un pievienojiet pacienta identifikācijas etiķeti vai uzrakstiet pacienta informāciju uz stobriņa etiķetes.