

PARAUGU UZGLABĀŠANA PROCEDŪRU KABINETOS LĪDZ TRANSPORTĒŠANAI UZ LABORATORIJU

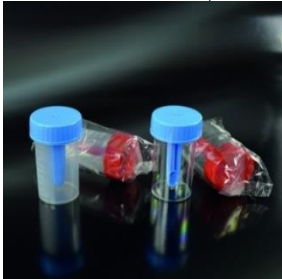
ASINS PARAUGI

Asins noņemšanas stobriņa krāsa (Sarstedt monovete)	Uzglabāšana līdz transportēšanai		Primārais paraugs	Testi (īpašas prasības)	
	Temperatūra C°	Maksimālais laiks			
Balts vāciņš	Ledusskapis +2+8 C°	48st	Asinis bez antikoagulanta	<u>Klīniskā ķīmija</u> Seruma atdalīšana Monoveti tur istabas temperatūrā 15-30 min, kamēr asins sarec, tad centrifugē 2000 apgr/10 min. Serumu atlej Ependorfa stobriņā. Kālijs – serumu atdalīt no eritrocītiem Glikoze – izmantot stobriņu ar fluoīdu -ņemot vērā kurjera grafiku un parauga glabāšanas laiku ilgāku par 2 st.	
Dzeltens vāciņš	Ledusskapis +2+8 C°	48st	Asinis ar fluoīdu	Glikoze, glikozes tolerances tests	
Balts vāciņš	Ledusskapis +2+8 C°	48st	Asinis bez antikoagulanta	<u>Imunoloģija (hormoni, markieri, infekciju diagnostika)</u> Seruma atdalīšana Monoveti tur istabas temperatūrā 15-30 min, kamēr asinis sarec, tad centrifugē 2000 apgr/10 min. Serumu atlej Ependorf a stobriņā. <u>Serumu atdalīt no eritrocītiem:</u> • Parathormons (PTH) • B12 vitamīns • Folskābe • PSA brīvais	
Balts vāciņš	Ledusskapis +2+8 C°	48 st.	Asinis bez antikoagulanta	Imūnhematoloģija (asins grupas, Rh fenotips, antieritrocitārās antivielas)	
Zaļš vāciņš	Istabas temperatūra +18+25 C°	4-24 st.	Asinis ar nātrija citrātu	Koaguloloģija <u>Testu stabilitāte pēc paņemšanas:</u> APTT – 4 st. Fibrinogēns-8 st. INR/Protrombīna komplekss-24 st. D-Dimēri -24 st.	

Sarkans vāciņš	Istabas temperatūra +18+25 C°	48st	Asinis ar EDTA K ₃	<u>Hematoloģija (asins aina, retikulocīti, EGĀ)</u> – ievietot ledusskapī +2+8 °C ņemot vērā kurjera grafiku un parauga glabāšanas laiku ilgāku par 6 st.
Sarkans vāciņš	Istabas temperatūra +18+25 C°	48st	Asinis ar EDTA K ₃	HbA1c – glikolizētais hemoglobīns

CITI MATERIĀLI

Konteiners	Uzglabāšana līdz transportēšanai		Primārais paraugs	Testi (īpašas prasības)
	Temperatūra C°	Maksimālais laiks		
Urīns (bez konservanta) 	Istabas temperatūra +18+25 C°	1 st.	Urīns bez konservanta	Urīna dažādi izmeklējumi Ja nevar nogadāt uz laboratoriju 1 st. laikā, urīnu pārlej stobriņā ar konservantu!!!
Urīns ar konservantu (UA preservative tube) 	Istabas temperatūra +18+25 C°	48st	Urīns ar konservantu	Urīna klīniskie izmeklējumi – uzglabāt ledusskapī +2+8 C° ņemot vērā kurjera grafiku un parauga glabāšanas laiku ilgāku par 24 st.
Urīns (konservants-borskābe)	Istabas temperatūra +18+25 C°	48st	Urīns ar konservantu	Mikrobioloģijas izmeklējumi - uzglabāt ledusskapī +2+8 C° ņemot vērā kurjera grafiku un parauga glabāšanas laiku ilgāku par 24 st.

					
Fēču trauciņš 		Ledusskapis +2+8 C ⁰	48st	Fēces	Koprogramma, apslēptās asins, parazītu diagnostika
Konteiners (sterile R) 		Istabas temperatūra +18+25 C ⁰	48st	Uztriepes	Chlamydia trachomatis diagnostika
Konteiners/petri plate 		Istabas temperatūra +18+25 C ⁰	48st	Nokasījumi no ādas, mati, nagi	Sēnīšu diagnostika
Krēpu trauciņš		Ledusskapis +2+8 C ⁰	48st	Krēpas	Krēpu klīniskie izmeklējumi

						
AMIES transporta barotne			Istabas temperatūra +18+25 C ⁰	48st	Uztriepes, dažādi materiāli	Mikrobioloģijas izmeklējumi
U broth transporta barotne			Ledusskapis +2+8 C ⁰	48st	Uztriepes	Mikoplazmas un ureaplazmas diagnostika
Priekšmetstikli			Istabas temperatūra +18+25 C ⁰	48st	Uztriepes	STS, citoloģija u.c.
Konteiners ar formalīnu			Istabas temperatūra +18+25 C ⁰	48st	Biopsiju materiāls	Histoloģija

				
- Cell Preservative Solution, Sure Path vai analogs - RoversCervex Brush 	Istabas temperatūra +18+25 C ⁰	48st	Materiāls no dzemdes kakla	Šķidruma citoloģija Cilvēka papilomas vīrusu (HPV) specifiskās DNS noteikšana un paveidu tipizēšana, PĶR tests
UTM, COPAN swab, Cell Preservative Solution, Sure Path vai analogs 	Istabas temperatūra +18+25 C	48st	Uztriepes: urogenitālais materiāls, materiāls no dzemdes kakla, rektālais materiāls, uztriepe no rīkles	Molekulārā diagnostika, PĶR testi STS panelis
Urīns (bez konservanta)	Istabas temperatūra +18+25 C	Pēc iespējas ātrāk nogādāt laboratorijā	Urīns bez konservanta	Molekulārā diagnostika, PĶR testi STS panelis

				
COPAN swab 	Istabas temperatūra +18+25 C⁰	48st	Nazofaringeālā, orofaringeālā uztriepe	Molekulārā diagnostika, PQR testi

14.06.2023

Laboratorijas galvenais ārsts O.Ļakutina