


## ŠĶIDRUMA CITOLOĢIJAS PARAUGA PAŅEMŠANAS INSTRUKCIJA

1. Noslaukiet liekās gļotas un asinis no dzemdes kakla ar vates tamponu un viegli ievietojiet citoloģiskās birstītes centrālo daļu dzemdes kakla kanālā, lai īsākie sariņi varētu pilnībā kontaktēties ar dzemdes kaklu.
2. Citoloģisko birstīti ļoti viegli spiediet uz priekšu un pagrieziet to 5 reizes vienā virzienā. Nekad negrieziet birstīti uz priekšu un atpakaļ!!!
3. Ievietojiet birstītes galvu konservēšanas šķīdumā savākšanas konteinerā.
4. Norādiet pacienta identifikāciju (vārds/uzvārds/personas kods/datums/nosūtījuma numurs) uz konteineru un nosūtiet uz MFD laboratoriju.

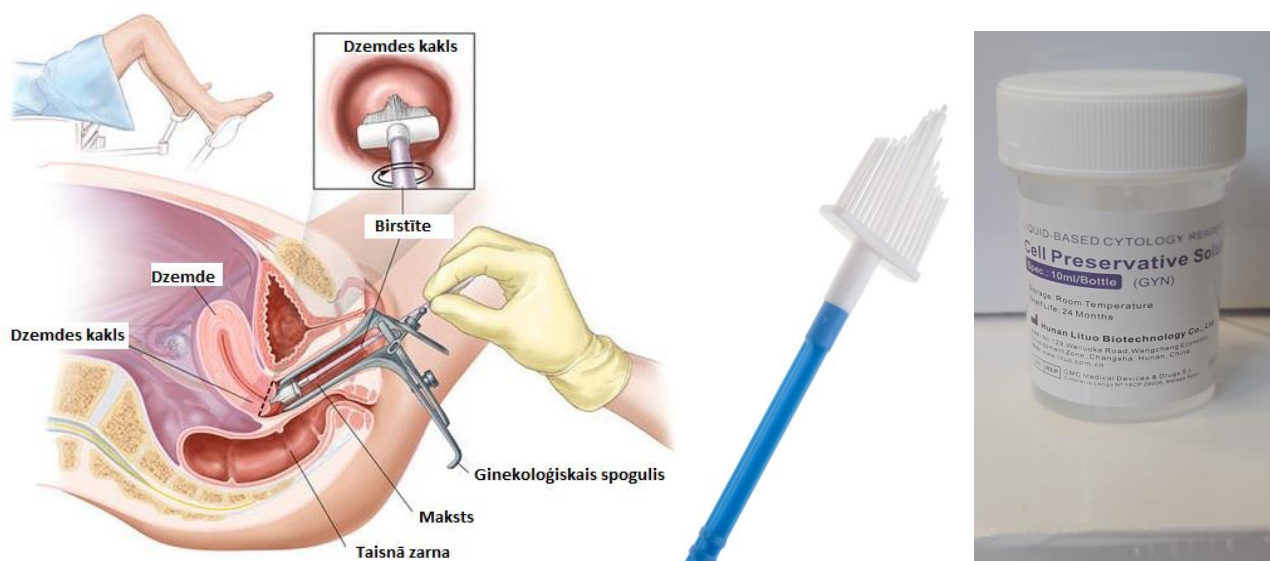

### 3. Piezīmes:

- Cik vien iespējams, izvairieties no paraugu savākšanas menstruāciju laikā un 24 stundas pēc zāļu lietošanas;
- Ja ir daudz gļotu un asiņu, pirms parauga ņemšanas noslaukiet gļotas un asinis ar vates tamponu (vajadzības gadījumā atkārtojiet 2-3 reizes); Ja ir daudz gļotu, bet ļoti mazas epitēlija šūnas, paraugi nav kvalificējami un paraugs ir jāiegūst no jauna.
- Materiāls jāņem ļoti rūpīgi, lai pārlicinātos, ka citoloģiskajai birstītei ir noteikts spiediens uz paņemto daļu.
- Citoloģiskās birstītes centrālie sariņi tiek ievietoti dzemdes kakla kanālā, un abas pusēs atrodas tuvu dzemdes kakla kanāla ārējai mutei, lai dzemdes kakla kanāla kopējā bojājuma vietā paņemtu pēc iespējas vairāk šūnu.
- Ja paraugu ņemšanas laikā ir acīmredzama dzemdes kakla asiņošana, paraugu ņemšana nekavējoties jāpārtrauc.
- Normālos apstākļos mēģiniet izvairīties no atkārtotas paraugu ņemšanas īsā laika posmā, lai izvairītos no kļūdaini negatīviem rezultātiem.
- Nosūtījuma veidlapa jāaizpilda, cik vien iespējams pilnīgāk, un pēc iespējas vairāk jāsniedz attiecīgā klīniskā informācija.