
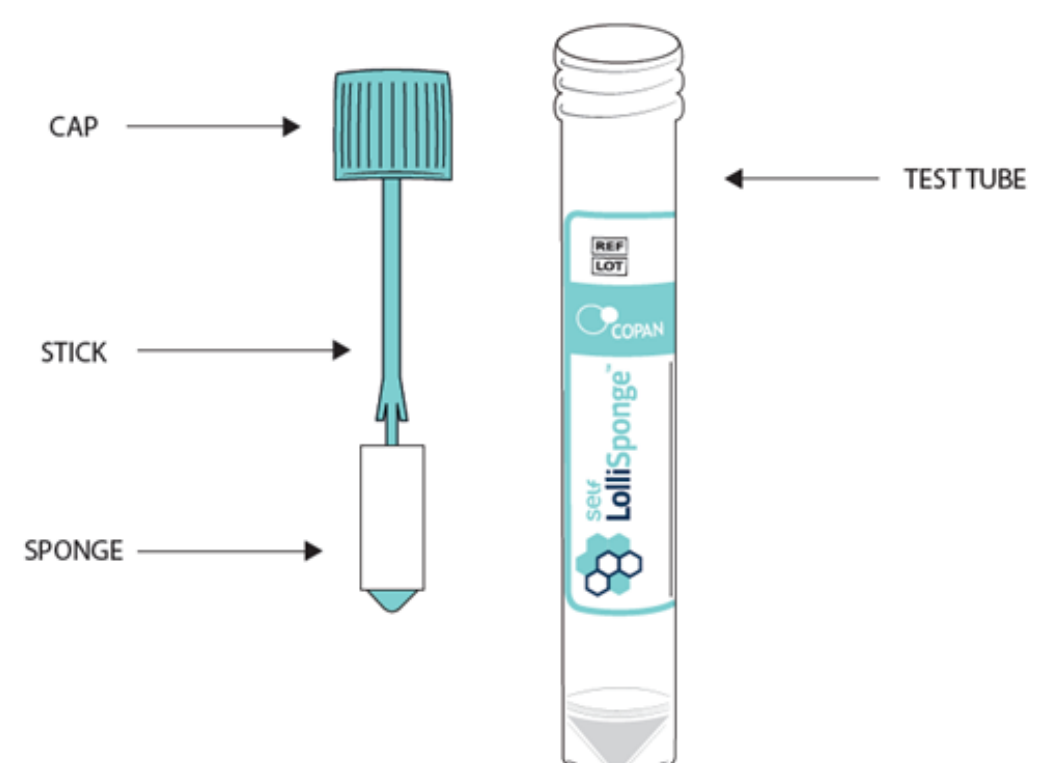


SIEKALU SAVĀKŠANAS INSTRUKCIJA

Uzmanību!

30 min pirms siekalu paraugu savākšanas, neēd, nedzer un netīri zobus!

- 1) Rūpīgi nomazgā un noslauki rokas.
- 2) Izņem siekalu trauciņu no iepakojuma.
- 3) Paņem siekalu stobriņu un atskrūvē vāciņu.
- 4) Ieliec mutē *Lollisponge* kociņu un paturi 60 sekundes (lai siekalas vieglāk uzsūcas, kociņu kustini mutē no augšas uz leju, aiz vaiga un zobiem).
- 5) Kociņu ieliec atpakaļ stobriņā.
- 6) Cieši aizskrūvē stobriņa vāciņu.
- 7) Uzlīmē stobriņam līdz iedoto bārkkodu, uz kura ir tavs uzvārds un piešķirtais numurs (skatīt attēlā)
- 8) Ievieto to atpakaļsūtīšanas maisiņā, aizver maisiņu.
- 9) Vēlreiz rūpīgi nomazgā un noslauki rokas.

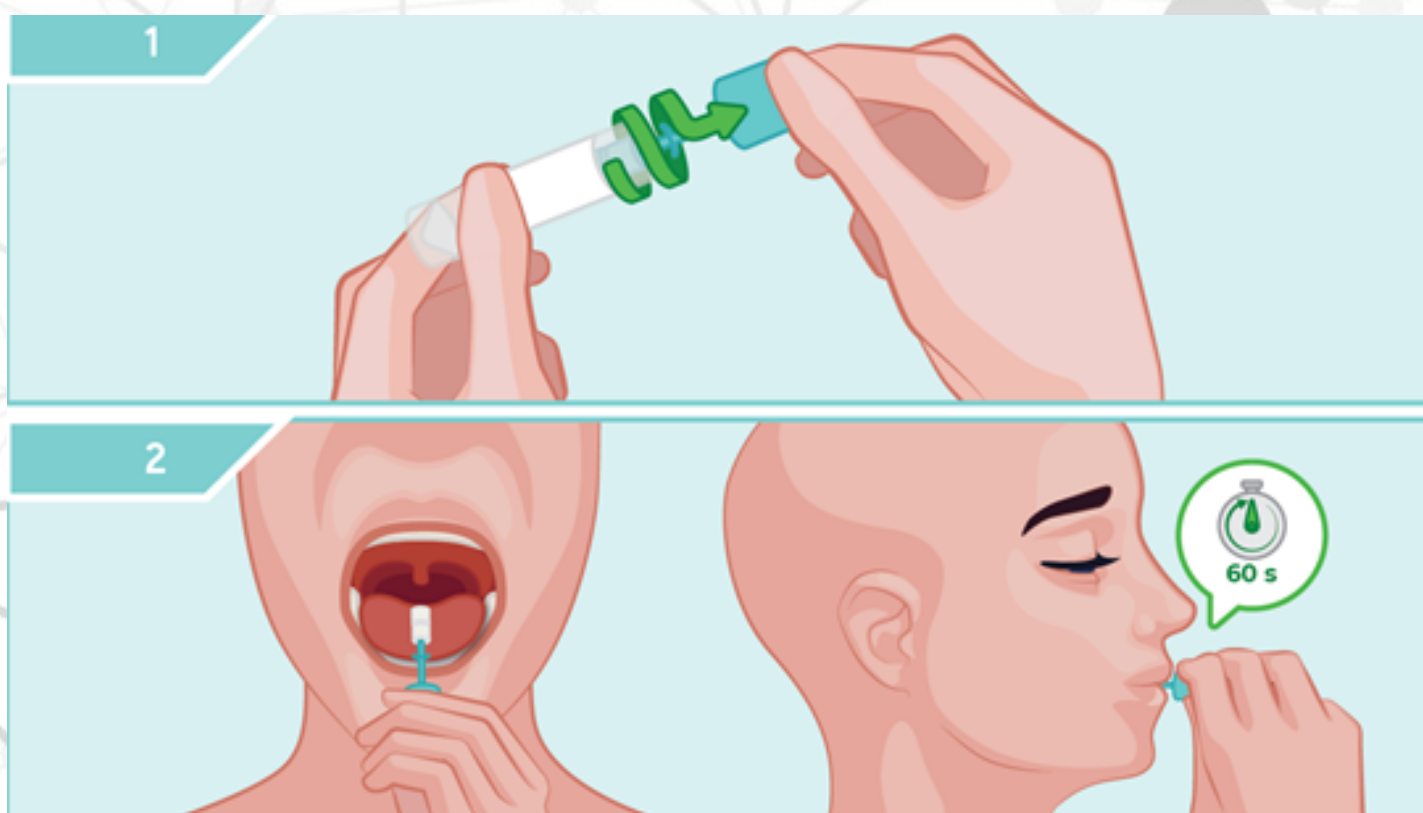

MFD

Veselības grupa