

# SIEKĀLU SAVĀKŠANAS INSTRUKCIJA

Uzmanību!

30 min pirms siekalu paraugu savākšanas, neēd, nedzer un netīri zobus!

- 1) Rūpīgi nomazgā un noslauki rokas.
- 2) Izņem siekalu trauciņu no iepakojuma.
- 3) Pieliec piltuvi pie mutes un spļauj iekšā līdz siekalas sasniedz zilo līniju.
- 4) Noskrūvē no trauciņa piltuvi un izmet to tam paredzētajā maisiņā.
- 5) Uzskrūvē trauciņam korķīti.
- 6) Pēc tam uzlīmē stobriņam līdzī iedoto barkodu, uz kura ir tavs uzvārds un piešķirtais numurs.
- 7) Stobriņu ieliec maisiņā.
- 8) Rūpīgi nomazgā un nosaluki rokas.



MFD

Veselības grupa